

感染予防対策 消毒・除菌方法の紹介

※一般的な消毒・除菌方法を紹介しています。
機器などに関しては各メーカーHPを参考にしてください。

5. 枕・ポジショニングクッション



《一般的な消毒方法》

- 汚れがひどい場合は、あらかじめ汚れを落としてから行う。
- 専用力カバーと本体に分けて洗浄または消毒を行い、乾燥する。
- 次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒液の噴霧については吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。

《注意点》

- 専用力カバーまたはクッションごとに使用可能な洗浄方法や消毒方法が異なっている。
- 各メーカー指定の希釈倍率で消毒液を使用しない場合や原液のまま使用する等の消毒方法は劣化につながるおそれがある。

《参考・引用》

テクノエイド協会、施設で福祉用具を取り扱う方のために
<http://www.techno-aids.or.jp/research/vol20.pdf>

厚生労働省、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

日本病院寝具協会、寝具類の消毒ガイドライン 第7版
<http://www.nbsk.net/wp/wp-content/uploads/8136834c1472bb5c68ca90f1a8558aa11.pdf>