

感染予防対策 消毒・除菌方法の紹介

※一般的な消毒・除菌方法を紹介します。
機器などに関しては各メーカーHPを参考にしてください。

6 (1) . 車椅子



《一般的な消毒方法》

【ハンドリム・フットサポート・手押しハンドルなど樹脂部分(プラスチック)】
次亜塩素酸ナトリウム液または次亜塩素酸水を含ませた布で清拭後、水を含ませた布で清拭し、乾いた布で清拭して乾燥させる。

【シートなど布部分】 【支柱など金属部分】
中性洗剤を含ませた布で清拭後、水を含ませた布で清拭し、乾いた布で清拭して乾燥させる。

《注意点》

ウレタン素材の部品に関しては、経年劣化によりひび割れなどが生じやすいため注意する。

《参考・引用》

厚生労働省、新型コロナウイルス対策、0.05%以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf

厚生労働省、次亜塩素酸水

<https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wy32-att/2r9852000002wybg.pdf>

日本リハビリテーション工学協会、注意勧告：車椅子・支援機器ユーザーのみなさまへ
<https://www.resja.or.jp/data/precautions.pdf>

株式会社松永製作所、マツナガの車椅子

https://www.matsunaga-w.co.jp/manual/pdf/next_1903.pdf

株式会社ミキ、車いす取扱説明書

<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/after/manual/mmhyojun1801-3si.pdf>

日進医療器株式会社、アルミ製車椅子、取扱説明書

https://www.wheelchair.co.jp/files/tor/tor_neoalp.pdf

株式会社カワムラサイクル、簡易モジュール車椅子、取扱説明書

https://www.kawamura-cycle.co.jp/pdf/instruction_manual/standard/kmd_a_20200306.pdf